

Használati utasítás

DuoMotion tusolósék-szoba WC kerekesszék
Összevont leírta a kis kerekű és
a 24' nagykerékű változatnak.




Bevezetés:

Köszönjük, hogy magas minőségű termékünket választotta. Útmutatónk segíti Önt, a termék szakszerű és kifinomult használatában.

A termék részei:

- 1 tolókar
- 2 háttámla
- 3 ülő fedlap
- 4 fixáló csavar
- 5 wc tartály fognatyúval
- 6 hátsó kerék (24' opcionális)
- 7 kétfunkciós parkolófék
- 8 kartámasz
- 9 kézifék a nagy kerékhez (opcionális)
- 10 lábtámasz
- 11 lábtámasz rögzítők
- 12 saroktámaszok

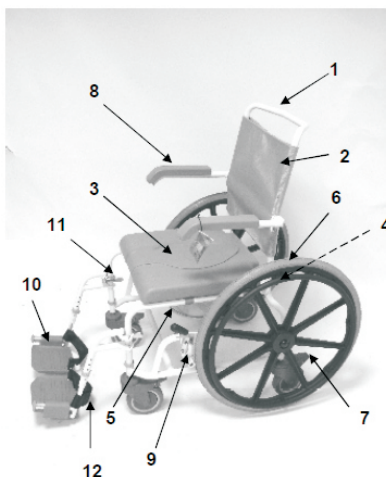

Indikációk:

Mindazok számára javasoljuk akiknek mozgásban akadályozottak a hagyományos fürdőszobai berendezések használatában.

Biztonsági tanácsok:

- olvassa el részletesen az útmutatónkat
- használat előtt ellenőrizze, hogy az alkatrészek nem sérültek-e
- használatkor, emeléskor, wc tartály behelyezésekor, a karfa felhajtásakor figyeljen, hogy a ruházata be ne csípődjön
- használat közben mindig fékezze parkoló állásba a kereket
- ki- és beszállás megkezdése előtt, hajtja fel a lábtámaszokat
- minden alkatrész újra hasznosítható anyagból készült

Összeszerelés:



1, helyezze be a kis kerekeket a váz megfelelő helyére és a kívánt magasságban rögzítse a klipekkel



2, helyezze be a háttámlát a váz megfelelő helyére és rögzítse a csillag csavarral



3, helyezze fel az üléslapot az ábra szerint



4, húzza fel a háttámla huzatot az ábra szerint



5, helyezze be a wc tartály a hátsó oldal felől



6, helyezze fel a tartó furatokbaa lábtámaszokat



7, helyezze be a higiéniai fedőt a megfelelő vágatba



Amennyiben a 24' kerekekt választotta, az ábrát követve végezze el a szükséges lépéseket:



Kétfunkciós stoppfékek:

Nyomja meg a kép szerint a féket lefelé, ekkor befékez, illetve ütközések lenyomva parkoló állásba kerül a kerék.


Nyomja meg a kerékhez közelebbi végét a fékkarnak és ekkor kiold a fék.



A lábtámaszok kioldása érdekében fordítsa a lábtámaszokat oldal irányba a kép szerint. Berögztítéshez mozgítsa a lábtámaszokat egészen befelé, kattanásig.



A lábtámaszok magassága állítható a kép szerint 6 lépésben. Távolítsa el a rögzítőstifteket, állítsa a kívánt magasságba a lábtámaszokat, majd helyezze vissza a furta a stifteket.

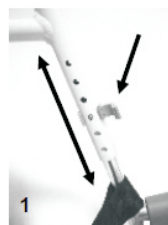

Tisztítás:

Nedves rongy segítségével rendszeresen tisztítsa a felületeket. Tisztításhoz általános tisztító szer használható. Ne használjon agresszív szereket. Felület fertőtlenítésre ajánlott pl. Descosept.

Műszaki paraméterek DuoMotin kis kerékekkel:

Teljes szélesség: 54,5 cm

Ülés magasság: 50-57 cm

Ülés szélesség: 44 cm

Ülés mélység: 41 cm

Háttámla hossza: 43 cm

Teljes hossz a lábtartóval együtt: 115 cm

Lábtartó nélküli hossz: 85 cm

6 lépésben állítható lábtartó hossza: 39-49 cm

Háttámla feletti tolókar magassága: 95,5-103 cm

Maximális terhelhetőség: 130 kg

Önsúly: 14 kg

Műszaki paraméterek:

Teljes szélesség: 69 cm

Ülés magasság: 50-57 cm

Ülés szélesség: 44 cm

Ülés mélység: 41 cm

Háttámla hossza: 43 cm

Teljes hossz a lábtartóval együtt: 115 cm

Lábtartó nélküli hossz: 85 cm

6 lépésben állítható lábtartó hossza: 39-49 cm

Háttámla feletti tolókar magassága: 95,5-103 cm

Maximális terhelhetőség: 130 kg

Önsúly: 20 kg

Garancia 12 hónap.

Forgalmazó:.....

Eladás kelte:

Magyarországi kizárólagos forgalmazó:

MEDIGOR BT

8200 Veszprém, Bezerédi u. 2.

www.gyogyaszati.hu Tel: 30/906-1006

Drive Medical GmbH & Co. KG
Leutkircher Straße 44
D-88316 Isny / Allgäu (Germany)