

t>>etac

Lehetőségek teremtése



c•etac”

Etac Alto

Mobil zuhanyzó-WC

A gondozási élmény javítása

Az Alto egy kompakt, motoros, mobil zuhanyzó-WC, amelynek magassága és dőlésszöge állítható, és amely zuhanyozásra, WC-használatra és szállításra egyaránt használható. Tervezésénél mind az ápolók, mind a felhasználók igényeit figyelembe vették, így kiválóan alkalmas különböző környezetekben, például otthoni ápolás, kórházak és tartós ápolási intézményekben.



Út a méltóság és a függetlenség felé

A korlátozott fürdőszobai hely kihívásokat jelent, ami gyakran oda vezet, hogy a segítségnyújtás nem az egyéni szükségletek, hanem a korlátok alapján történik, ami kompromisszumokhoz vezet. A gondozók fizikailag megterhelő feladatokkal szembesülnek, jelentős időt töltenek rossz testtartásban, ami sérüléseket okozhat.

A kis helyiségekhez tervezett Alto könnyű hozzáférést biztosít, ami leegyszerűsíti az ápolási feladatokat és kiküszöböli a költséges felújításokat. A gondozók számára ez a stressz és a sérülésveszély csökkenését jelenti, ami jobb, méltóságteljesebb ápolást eredményez.

Fedezze fel a funkciókat

Kiváló manőverezhetőségű, 360 fokos hozzáférést biztosító szék, amelyet kifejezetten úgy terveztek, hogy megkönnyítse a gondozói feladatokat, miközben kényelmet biztosít a felhasználó számára.



Alto

Az Alto egy elektromos, állítható magasságú és dőlésszögű szék. Kivételes manőverezhetőséget és ergonómikus, 360 fokos hozzáférést biztosít, csökkentve ezzel a gondozók sérülésének kockázatát.

Ergonómikus hozzáférés a gondozók számára

Segítsen a teljes higiéniai rutin elvégzésében anélkül, hogy fizikailag megterhelő feladatokat kellene végrehajtania, túlnyúlnia vagy kényelmetlen testhelyzeteket, amelyek munkával kapcsolatos sérülések

Könnyen manőverezhető és kezelhető

Lehetővé teszi a felhasználó egykezes szállítását a fürdőszobába, onnan ki, valamint a fürdőszobán belül. Ez megkönnyíti, biztonságosabbá és kellemesebbé teszi a gondozó munkáját

Kompakt és célszerű kialakítás

Célszerű kialakításának köszönhetően a legtöbb WC-re ráilleszhető, és könnyedén áthalad az ajtókon, így a felhasználók otthonukban maradhatnak, minimális vagy egyáltalán nincs szükség átalakításra.

Fokozott kényelem és kényelmes használat

A magasság és a dőlésszög állíthatósága, valamint a számos kiegészítőnek köszönhetően javul a felhasználói kényelem és a gondozói kényelmes használat, ezáltal javul az ellátás általános minősége, a méltóság és a jóllét.



Az Alto-ra 5 év garancia és 8 év életmentő garancia vonatkozik (1 év garancia az életmentő garancia).

Alto

Cikkszám	Alto
80229600	Alto, EU serpenyőtartóval
80229601	Alto, UK serpenyőtartóval
80229602	Alto, CH serpenyőtartóval
80229603	Alto, USA, edénytartóval
80229604	Alto, AU serpenyőtartóval
80229605	Alto, EU letörölhető háttámlával, edénytartóval
80229606	Alto, UK letörölhető háttámla, edénytartóval
80229608	Alto, EU egyenes háttámla, egyenes fejtámasz, edénytartóval
80229609	Alto, EU
80229610	Alto, EU egyenes háttámla, egyenes fejtámasz, edénytartó, fedeles edény, lábtámasz nélkül
80229611	Alto, EU egyenes háttámla, egyenes fejtámasz, letörölhető háttámla, edény tartó, edény fedéllel, ferde lábtámasz nélkül
80229612	Alto, UK egyenes háttámla, egyenes fejtámasz edénytartóval
80229613	Alto, EU letörölhető háttámla, edénytartó, felhajtható lábtámaszok
80229614	Alto, EU, egyenes háttámla, egyenes fejtámasz, letörölhető háttámla, edénytartó
	Alto, EU, felhajtható lábtámaszok

Cikkszám

Anyagok

Váz: porfestett acél Ülés/karfa: polipropilén
Puha háttámla: poliészter/tépőzáras Lábak: polipropilén
Görgők: poliamid/TPE, rögzíthető, golyóscsapágyas
Törölhető háttámla: polipropilén



Kéz-tisztítás:



160 max
353 max
kg lbs

Tisztítsa meg a terméket szokásos, nem koptató tisztítószerekkel (pH 5-9 között). Öblítse le és szárítsa meg. Fertőtlenítse a terméket 70%-os alkoholos törölkendővel. Hagyja levegőn megszáradni.
Gépes tisztítás:
A terméket mosógépben vagy alagútmosóban tisztítsa. A mosógép vagy alagútmosós tisztítást az EN/ISO 60601-2-52 szabványnak megfelelően kell elvégezni.

Maximális felhasználói súly: 160 kg / 353 lbs.



A lakóépületek fürdőszobáinak kihívásainak megoldása

A lakóépületek fürdőszobáiban végzett munka kihívást jelenthet a korlátozott hely és a keskeny ajtónyílások miatt. A számos elérhető WC-modell közül nehéz lehet olyan falra szerelhető változatot találni, amely jól illeszkedik a dönthető, mozgatható zuhanyzó-WC-khez.

Az Alto-t kifejezetten otthoni ápolási környezetre tervezték, kompakt méretei ideálisak kisebb terekbe. A termékcsaládban megtalálható egy változat egyenes háttámlával és egyenes fejtámasszal, amely egyedülálló kombinációja lehetővé teszi, hogy a széket közelebb helyezték a falhoz, és biztosítja a falra szerelhető WC-k és számos intelligens WC zökkenőmentes illeszkedését.

A függőleges fejtámasz szerszámok használata nélkül is könnyű oldalirányú beállítást tesz lehetővé, valamint magassági és mélységi beállítást is, hogy minden felhasználó számára kényelmes élményt biztosítson.



Alto függőleges háttámlával és függőleges fejtámasszal falra szerelt WC felett.

Higiénikus és könnyen tisztítható

A helykorlátozásokon kívül más szempontokat is figyelembe kell venni. Intézmények és kórházak esetében a fertőzésmegelőzés és a higiénia fontos tényezők. A mobil zuhanyzószekrének könnyen tisztíthatónak kell lennie, hogy naponta több felhasználó is használhassa.

Az Alto kialakítása biztosítja a könnyű tisztítást és karbantartást, így biztonságos és higiénikus környezetet teremt. Kínál egy változatot higiénikus háttámlával, könnyen tisztítható felületekkel és kevés látható csavarfejjel, ahol szennyeződés halmozódhat fel. Ezáltal az Alto otthoni ápolásra és intézményekben egyaránt alkalmas.

A letörölhető háttámla úgy van kialakítva, hogy támogassa a gerinc természetes ívelését, elősegítve a jó testtartást és a kényelmet. Alsó része enyhén rugalmas, hogy alkalmazkodjon a felhasználók különböző testalkatához.

Összeszerelése egyszerű, nincs szükség szerszámokra. Ezenkívül a letörölhető háttámla magassága könnyen beállítható a vázon felfelé vagy lefelé csúsztatva a támaszt.



Az Alto letörölhető háttámlával gyors és egyszerűvé teszi a tisztítást.

Kiegészítők

Az Alto kompatibilis a Swift Mobil-2 kiegészítők széles választékával, így személyre szabható.



Zárt hátsó ülés
84001337
Hátul zárt ülés, elől higiéniai nyílással az ülés körüli extra támasztás érdekében.
Anyag: polipropilén



Puha, kényelmes ülés, 4 cm-es hátsó nyílás
80209519
Ergonómikus kialakítású, rendkívül puha, kényelmes támasztást és pihenést biztosít. Elülső résszel ellátott kialakítás. Anyag: Poliuretán



Puha, kényelmes ülés, 2 cm-es hátsó nyílás
80209518
Kifejezetten puha és lekerekített formájú, a maximális kényelem érdekében. Elülső résszel ellátva.
Anyag: poliuretán



Puha, kényelmes ülés, 4 cm
Kis nyílás 15 cm (6"): 80209507
Nagy nyílás 18 cm (7"): 80209506
Ergonómikus kialakítású, puha, kényelmes ülőfelületek, elülső mélyedéssel. A legmélyebb ponton a magasság 4 cm.
Anyag: poliuretán



Puha kényelmi ülés, 2 cm
18 cm-es nyílás: 80209306
Formázott, puha kényelmi ülés, elülső bemélyedéssel. A magasság a legalacsonyabb ponton 2 cm. Anyag: poliuretán




Üléshuzat
80209434
Kényelmes, zárt ülés, ha el szeretné takarni a higiéniai nyílást. Zuhanyozás közben is használható. Magasság: 2 cm.
Anyag: poliuretán



Fejtámasz
80209521
Többféleképpen állítható fejtámasz formázott párnával. Magasságban, mélységben, oldalirányban és szögben is állítható. Tartóval együtt. Anyag: Párna: poliuretán Tartó: rozsdamentes acél



Fejtámasz, függőleges
80209533
A függőleges háttámlával kombinálva a szék közelebb helyezhető a falhoz. Többféleképpen állítható, formázott párnával. Tartóval együtt. Anyag: Párna: poliuretán Tartó: rozsdamentes acél

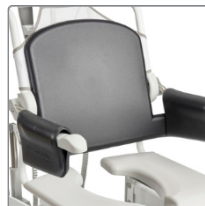

Kényelmi huzat
80209455
Puha háttámla beépített kartámasz párnákkal. A kényelmes párnázás puha támaszt nyújt, miközben a kartámasz tapadófelülete szabadon marad.
Anyag: Polietilén



Kényelmi készlet
80209457
Puha háttámla beépített kartámaszokkal és puha üléssel.
Anyag: Polietilén



Oldaltámasz
80209509
Puha oldaltámaszt nyújt és megkönnyíti a székben való elhelyezkedést. Szélességében állítható. Anyag: poliészter szövet, tépőzárás rögzítés, polietilén



Keresztléc
60,5 cm 80303034
66,5 cm 80209452
Biztonságos támasz, amelybe kapaszkodni lehet. Terheléscsökkentő támaszként is használható. A kartámaszokhoz rögzíthető.
Anyag: alumínium, polietilén



Puha háttámla párna
80209448
Melegséget és puhaságot biztosít a felhasználó számára. A kartámaszok belsejében használható, ami lehetővé teszi a kartámaszok felhajtását és megkönnyíti az oldalirányú átülést.
Anyag: Polietilén



Karfa párna
80209508
A karpárnák körüli puhaság biztosítására szolgál. Meleg, puha felületet biztosít a karok támasztásához, miközben a fogófelület szabad marad, így biztonságos a felállás.
Párban kapható. Anyag: Polietilén

Kiegészítők



Kar támasz Hemiplegia

80209035

Kontúrozott alakjának köszönhetően támaszt nyújt az alkar számára. Külső felületén hőviszaverő anyaggal van ellátva. Mind a bal, mind a jobb kartámaszra illeszkedik.

Anyag: Polietilén



Tál

Fedél nélküli tál 80209254

Fogantújs fedél 80209256

Egyedi belső kialakítás, amely megtöri az áramlást és megakadályozza a fröccsenést.

Anyag: polipropilén



Karfa rögzítő

80209445

A rögzítőcsap akkor használható, ha a kartámaszt lefelé vagy felfelé hajtott helyzetben szeretné rögzíteni.

Anyag: rozsdamentes acél




Tálca tartó

80209257

Alkalmas mind az Etac, mind a hagyományos kórházi edényekhez. A külön rendelhető rögzítőtartókkal együtt használható.

Anyag: polipropilén

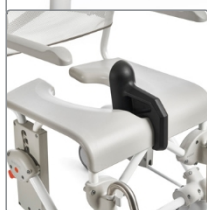

Fröccsenésgátló

80209430

Puha védelem a vizelet fröccsenése ellen az elülső részen. Az ülés elülső mélyedéséhez rögzíthető és könnyen eltávolítható.

Anyag: poliuretán




Tálca

80209049

A zuhanyzószek döntése közben a tálca a helyén tartja. Kompatibilis a Swift Mobil Tilt-2 változatokkal.

Anyag: polipropilén

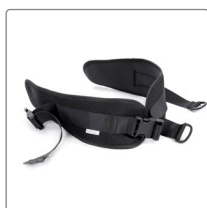

Csípő-/mellkasöv, kárpitozott

80209524

2 részes pozicionáló öv, amely csípő- vagy mellkasövként is használható. 3 csat segítségével 65–130 cm hosszúságra állítható. Az anyag kényelmes és gyorsan szárad, valamint szilárd támaszt nyújt a pozicionálás során.



Rögzítő tartó

80209435

Az ülés alá rögzíthető, lehetővé téve a tálca használatát. Csavarhúzóval szerelhető. Teljes készlet.

Anyag: poliamid



Csípőöv

80209440

Műanyag csat segítségével könnyen állítható. Háttámla kárpitjának pántjai köré. A mellkasöv használatát csípőövvel együtt javasoljuk.

Anyag: poliészter



Alacsony rögzítésű edény/vödör

80209259

Akkor használható, ha a tálca/vödört alacsonyabban szeretné elhelyezni az ülés alatt. A tálca- vagy vödörtartókkal együtt szerelhető fel. 6 cm-rel lejjebb helyezi a tálca-/vödörtartókat.

Anyag: polipropilén



Mellkasöv

80209442

Könnyen beállítható és rögzíthető a háttámla kárpitjának pántjai köré. A mellkasöv használatát csípőövvel együtt javasoljuk.

Anyag: poliészter



Vödör tartó

80209258

Magasabb peremű edények/vödörök vagy ágytálcák tartójának használható. A külön rendelhető rögzítőelemekkel együtt használható.

Anyag: polipropilén



Fedeles, fogantújs edény

80209255

Egyedi belső kialakítás, amely megtöri az áramlást és megakadályozza a fröccsenést. A fedél fogantújsval rendelkezik, amely rögzül a tálcahoz, és biztosítja, hogy a tartalom ne ömöljön ki.

Anyag: polipropilén



Vödör fogantújsval és fedéllel

80209265

Hagyományos vödör, amelyet vödörtartóval együtt használunk.

Anyag: polipropilén

Kiegészítők



Rövid lábtartó

80209520

Oldalra elforduló rövid lábtámasz. 12,5 cm-re állítható, a lábtámasz hossza 24–36,5 cm. A lábtámasz lemeze lekerekített. Párban kapható. Anyag: rozsdamentes acél és polipropilén



Lábtámasz amputáltak számára

80209510

Magasság, hosszúság és szög tekintetében állítható. Bal és jobb oldalon egyaránt használható. Amputált felhasználók számára a billenésgátló használatát javasoljuk.

Anyag: rozsdamentes acél és poliuretán



Lábtámasz felhajtható lábtámaszokkal

80209446

Magasságban állítható, elfordítható lábtámasz összecusukható lábtámaszokkal. Azok számára, akiknek nagyobb lábszögre van szükségük. Sarokpántok tartoznak hozzá. Párban kapható.

Anyag: rozsdamentes acél és polipropilén



Letörölhető háttámla

80209530

Támogatja a gerinc természetes ívelését, elősegítve a jó testtartást és a kényelmet. Magasságban állítható és az alsó részén enyhén rugalmas. Könnyen tisztítható, karbantartható és felszerelhető.

Anyag: polipropilén



Láb- és vádli támasz

80209437

Állítható szögű lábtámasz, amely bal és jobb lábra egyaránt használható. 4 rögzített szögbeállítással rendelkezik. Darabonként értékesítjük. Anyag: Rozsdamentes acél és ABS-műanyag



Görgőirány-reteszelő

80209534

Lehetővé teszi a görgő irányának rögzítését a folyosókon való könnyebb manőverezés érdekében. A fék színe: fekete

Anyag: poliamid, polipropilén, TPE, Fe



Láb- és vádli támasz burkolat

80209535

Fokozott kényelem a puha felületnek köszönhetően, amely könnyen felcsúsztatható a támaszra.

Gyorsan és egyszerűen tisztítható, egy egyszerű letörléssel. Anyag: poliészter, poliuretán, nejlon, spandex



Láb- és vádli támaszhoz való lábtámasz

80209443

Készlet külön lábtámasztékkal, a láb- és vádli támaszra szerelhető.

Anyag: ABS műanyag



Szögletes lábtámasz plusz

80209531

A lábtámaszt távolabb helyezi a vázaktól. Párban kapható.

Anyag: rozsdamentes acél és poliuretán



Szögletes lábtámasz mínusz

80209532

A lábtámaszt közelebb hozza a vázhoz. Párban kapható.

Anyag: rozsdamentes acél és poliuretán

Lásd a mosási utasításokat a 10. oldalon.

A kiegészítők mosási utasításai

Puha, kényelmes ülés és ülészuzat, fejtámasz, függőleges fejtámasz, kartámasz-reteszelés, sárvédő, edénytartó, edénytartó-rögzítő, alacsony rögzítési pont, vödörtartó, vödör, lábtámasz, lábszár- és vádlitámasz, amputáltak számára készült lábtámasz, görgőirány-reteszelés, zárt háttámla, és letörölhető háttámla



Hátlap kárpitozás, kárpitozott csípő-/mellkasöv, csípőöv, mellkasöv öv, valamint sarokpánt



Puha párnák, kényelmi huzat, puha háttámla párna, kartámasz párna, kartámasz hemiplegiás betegek számára, keresztirud, valamint láb- és vádli támasz huzata



A mosási szimbólumok magyarázata



Gépmosás – max. hőmérséklet 60 °C / 140 °F



Kézi tisztítás: Tisztítsa meg a terméket oldószermentes, 6–9 közötti pH-értékű tisztítószerrel vagy 70%-os fertőtlenítő oldattal.



Gépes tisztítás: A termék szekrényes mosó-fertőtlenítőben, max. 85 °C / 185 °F hőmérsékleten, 3 percre tisztítható.



Méretetek




Modell	Hossz	Szélesség	Ülésmagasság	Háttámla magassága	Ülésmélység
--------	-------	-----------	--------------	--------------------	-------------

Alto	972 mm ^{38 1/4"}	600 mm ^{23 1/2"}	500 \pm 30 mm 19 ^{3/4} \pm 6 ^{1/2} "	540 mm (590 mm*) 21 ^{1/4} (23 ^{1/4} "*)	465 mm ^{18 1/4"}
------	---------------------------	---------------------------	---	--	---------------------------




Modell	Lábak magassága	Ülésszélesség	Karfa magassága	Karfa a karfáig	Méretetek a WC felett
--------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------------

Alto	340 \pm 65 mm 13 ^{1/2} \pm 8 ^{1/4} "	500 mm ^{19 3/4"}	220/250/280 mm 8 ^{3/4} / 9 ^{3/4} / 11"	420/480/540 mm 16 ^{1/2} / 19 / 21 ^{1/4} "	A = Min. 105 mm B = 190 mm C = Min. 600 mm (510 mm)* 23 1/2" (20")
------	---	---------------------------	---	--	--

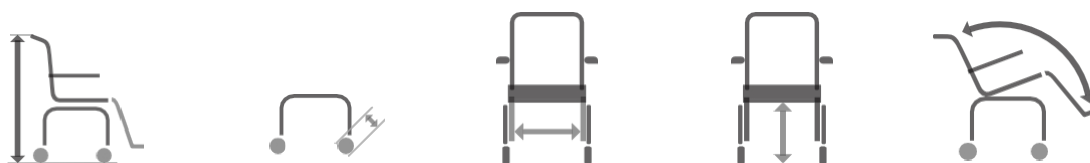

Modell	Magasság	Görgők	Szabad magasság a WC felett	Szabad magasság a WC felett	Dőlésszög
--------	----------	--------	-----------------------------	-----------------------------	-----------

Alto	1040–1470 mm (1085–1515 mm*) 41–58" (42 ⁽³⁴⁾ – 59 ^(34*))	125 mm 5"	430 mm (406 mm)** 17" (16")**	445 mm ^{17 1/2"}	-5° – 30°
------	--	--------------	----------------------------------	---------------------------	-----------

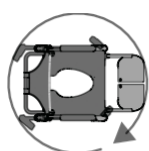

Modell	Fordulási sugár	Maximális felhasználói súly	Súly
--------	-----------------	-----------------------------	------

Alto	Ø 1005 mm Ø 39 1/2"	160 kg 352 lbs	40 kg 88 lbs
------	------------------------	-------------------	-----------------

*Az 8022 9607, 8022 9608 típusokra vonatkozik **Ha a készüléket középre kell helyezni



Alto_Pesiera_05_INT

Az Etac a világ vezető fejlesztője az innovatív segítő eszközök és betegmozgató berendezések terén. 1973 óta elkötelezettek vagyunk az az egyének, családtagjaik és gondozóik életminőségének javítására.

A termékek rendeltetésszerű használatáról és a legfrissebb információkról a www.etac.com oldalon tájékozódhat.

Etac



+46 371 587 330

info@etac.se

www.etac.com

etac[®]

Creating Possibilities