

t>>etac

Lehetőségek teremtése



c•etac”

Etac Clean

Mobil zuhanyzó-toalettisékek

Clean – Díjnyertes klasszikus

A Clean mobil zuhanyzószek az Etac egyik abszolút bestsellere. 1999-ben került forgalomba, és azóta is meghatározó szerepet játszik a zuhanyzószékek piacán. Kiváló higiéniai tulajdonságai és felhasználóbarát jellemzői miatt világszerte népszerű mind az ápolási intézményekben, mind az otthoni környezetben.

Könnyen vezethető és manőverezhető

A Clean egyik legfontosabb jellemzője a kiváló manőverezhetőség. Karcsú kialakításának köszönhetően könnyedén áthalad az ajtókon, és szűk helyekre is befér. A széles tolófogantyú különböző fogásmódokat tesz lehetővé, így a szék rendkívül könnyen kezelhető a gondozó számára.

Rugalmasság – bonyolultság nélkül

A Clean kiváló funkcionalitást kínál – felesleges bonyolultság nélkül. A kartámaszok egy egyszerű kattintással elmozdíthatók vagy eltávolíthatók az átültetés megkönnyítése érdekében, a fékek pedig könnyen elérhetők, reteszeltetők és oldhatók. Az ergonomikus lábtartó egyedülálló, kihajtható, vagy használaton kívül az ülés alá rejthető.

Számos lehetőség a különböző felhasználók sz

A Clean család három modelltől és számos változattól áll, mindegyik egyedi jellemzőkkel rendelkezik, hogy a legjobban megfeleljen a különböző felhasználói igényeknek.



Jellemzők



Karcsú, de tágas

A szék letisztult és karcsú, mégis tágas és kényelmes ülőfelületet biztosít a felhasználó számára.



Könnyű hozzáférés a testápoláshoz

A standard ülés hátul nyitott, elöl pedig egy mélyedés található, amely megkönnyíti a higiéniai célú hozzáférést. Kapható egy elől nyíló ülésel ellátott változat is.



Különböző WC-modellekhez illeszkedik

A szék szorosan a falhoz illeszkedik, és a függőleges vázának köszönhetően falra szerelt WC-khez is tökéletesen illeszkedik.



Ergonómikus lábtartó

A praktikus lábtámasz puha, lekerekített alakú, így kényelmet és ívelt támaszt nyújt a lábaknak.



Clean zuhanyzószék

	Fehér	Lagúna zöld
44 cm (17¼"), 4 rögzíthető görgő	80229269	80229209
49 cm (19¼"), 4 rögzíthető görgő	80229270	80229210
49 cm (19¼"), 2 rögzíthető görgő	80229273	80229213
55 cm (21¼"), 4 rögzíthető görgő	80229271	80229211
55 cm (21¼"), 2 rögzíthető görgő	80229274	80229214

60 cm (23¼"), 2 rögzíthető görgő, magasságnövelő alátétekkel

80229275 80229215

Tiszta zuhanyzószék 2 db/doboz

	Fehér	Lagúna zöld
49 cm (19¼"), 4 rögzíthető görgő, 2 db/doboz	80209304	80229220
49 cm (19¼"), 2 rögzíthető görgő, 2 db/doboz	80229283	80229223
55 cm (21¼"), 4 rögzíthető görgő, 2 db/doboz	80229281	80229221
55 cm (21¼"), 2 rögzíthető görgő, 2 db/doboz	80229284	80229224

Maximális felhasználói súly

130 kg

Súly

44 cm: 13,5 kg
49 cm: 14,0 kg
55 cm: 14,5 kg
60 cm: 15,0 kg

Anyag

Váz: Porszórt acélsző Ülés/háttámla: Polipropilén Karfa: Polipropilén Lábak: polipropilén Görgőtartók: poliamid Görgők: poliamid/TPE

Karbantartás



Kézi tisztítás: Tisztítsa meg a terméket oldószertmentes, 6–9 közötti pH-értékű tisztítószerekkel vagy 70%-os fertőtlenítő oldattal.

Gépes tisztítás: A termék szekrényes mosó-fertőtlenítőben, max. 85 °C / 185 °F hőmérsékleten 3 percig.



A Clean Height Adjustable

A Clean Height Adjustable különböző ülés magasságokra állítható, így alkalmazkodik a felhasználók változó igényeihez, például megkönnyíti az átülést vagy illeszkedik egy bizonyos típusú WC-hez. Ez a modell olyan gondozási intézményekben is alkalmas, ahol egy széknek több felhasználót kell kiszolgálnia.

Ugyanaz a szék minden magassághoz

Az ülés magasság állításának lehetősége azt jelenti, hogy a szék különböző igényekhez igazítható. A maximális magasság 60 cm, és a beállításhoz nincs szükség szerszámokra. Ezen kívül ugyanazokkal az előnyökkel rendelkezik, mint a Clean termékcsalád többi tagja.

Kiegészítő lábtámasz

Ehhez a modellhez kiegészítő lábtámasz is rendelhető. A kiegészítőkről bővebben a 9–11. oldalon olvashat.



Alkalmas a jövő ápolási igényeire

Az előrejelzések szerint a népesség elöregedésével az embereket egyre inkább otthonukban fogják ápolni otthonukban fogják ellátni őket. Ez a prognózis magas követelményeket támaszt a jövőbeli fürdőszobai segédeszközökkel szemben, amelyeknek mind az ápolási intézmények, mind az otthoni környezet igényeinek meg kell felelniük.

A Clean karcsú, higiénikus és könnyen kezelhető kialakítása révén több mint alkalmas a jövő ápolási igényeinek kielégítésére. További információk a www.etac.com oldalon találhatóak.

Clean magasságállítható

4 rögzíthető kerék
4 rögzíthető kerék

Fehér

80229208

Lagúna zöld

-
80229203

Súly

14,2 kg

Maximális felhasználói súly

130 kg

Anyag

Váz: Porszóró acélcső Ülész/háttámla: Polipropilén Karfa: Polipropilén
Lábtámasz: polipropilén
Görgők: poliamid/TPE/rozsdamentes acélcső
Görgőmagasság-állító csövek: rozsdamentes acél

Karbantartás



Kézi tisztítás: A terméket oldószermentes, 6–9 közötti pH-értékű tisztítószerrel vagy 70%-os fertőtlenítő oldattal tisztítsa.

Gépes tisztítás: A termék szekrényes mosó-fertőtlenítőben, max. 85 °C / 185 °F hőmérsékleten 3 percig.





Tisztítsa meg 24"

Az önállóbb felhasználók számára a Clean sorozat önjáró modellje is rendelkezésre áll. Ugyanazokkal az előnyökkel rendelkezik, mint a sorozat többi tagja, de mozgásszabadságot biztosít azoknak a felhasználóknak, akik önállóan tudják kezelni a kerekesszéket.

Könnyen manőverezhető

A szék könnyen manőverezhető a 24 hüvelykes kereknek köszönhetően, amelyek elhelyezkedése elősegíti a mindennapi tevékenységeket és biztosítja a kényelmet.

Megkönnyíti az átülést

A nagy ülés és a kerekek előtti nyitott tér megkönnyíti az átülést a székbe és onnan ki. A fékkarok elhelyezkedése is úgy van kialakítva, hogy ne zavarják az átülést, ugyanakkor mindig könnyen elérhetőek legyenek.



Folyamatosan frissítve

Az Etac legtöbb termékéhez hasonlóan a Clean is folyamatosan fejlődött az évek során, és ezalatt a folyamat alatt mindig ügyeltünk arra, hogy a klasszikus Clean *modern* maradjon.

Mivel a személyes higiénia elsősorban egyéni preferencia kérdése, tudjuk, mennyire fontos a választási lehetőségek biztosítása. Ezért új modellekkel is bővült a termékcsalád.

Clean 24"

	Fehér	Lagúna zöld
55 cm (21¾) 24 hüvelykes hátsó kerekkel	80229276	-
55 cm (21¾) 24 hüvelykes hátsó kerekkel	-	80229216

Súly

20,0 kg

Maximális felhasználói súly

130 kg

Anyag

Hátsó kerék adapter: alumínium Hátsó kerekek: poliamid, tömör gumiabroncsok Váz: porfestett acélcső Ülés/háttámla: polipropilén Karfa: polipropilén Láb támasz: polipropilén Görgőtartók: poliamid Görgők: poliamid/TPE

Karbantartás



Kézi tisztítás: A terméket oldószermentes, 6-9 közötti pH-értékű tisztítószerrel vagy 70%-os fertőtlenítő oldattal tisztítsa.

Gépes tisztítás: A termék szekrényes mosó-fertőtlenítőben, max. 85 °C / 185 °F hőmérsékleten 3 percig





Számos lehetőség a különböző felhasználói igények kielégítésére

A Clean termékcsalád alapmodelljei mellett számos változat áll rendelkezésre az egyéni igények kielégítésére. Mindezt azért, hogy a lehető legtöbb lehetőséget biztosítsuk, és segítsünk a felhasználóknak a higiéniai rutinok saját igényeiknek megfelelő kezelésében.



Clean elől nyíló üléssel

Az elől nyíló ülés azoknak a felhasználóknak lehet megfelelő, akik mozgáskörük vagy személyes preferenciáik függvényében önállóan tudnak nyúlni. Az előlről való hozzáférés egyes gondozók számára is kényelmesebb lehet. Ez a modell különösen előnyös lehet, ha törlés helyett kézi zuhanyt használnak.

A Clean és a Clean 24" változatokhoz kapható.

Clean puha háttámlával

A puha háttámlával ellátott változat tökéletes azoknak a felhasználóknak, akiknek érzékeny a háta, mivel a gerinc alakjához igazodik és támaszt nyújt a felhasználó hátának. A puha háttámla a hátsó három pánttal könnyen beállítható.

Változatként és kiegészítőként is kapható.



Clean kényelmi készlettel

A kényelmi csomag fokozza a jólétet azok számára, akiknek extra puhaságra és támaszra van szükségük. A párnázott ülés, háttámla és kartámaszok kényelmes ülőpozíciót biztosítanak, a hővisszaverő felületek pedig segítenek a felhasználónak melegen maradni. A kényelmi csomag emellett fokozhatja az integritás és méltóság érzését kiszolgáltatott helyzetekben, mivel körülveszi a felhasználót – anélkül, hogy korlátozná a gondozó hozzáférését.

Változatként és kiegészítőként is kapható.

Tisztítsa meg a puha háttámlával		Tisztítás elől nyitható üléssel	
44 cm (17¼"), 4 rögzíthető kerék, puha háttámla, edénytartó	Fehér 80229286	49 cm (19¼"), 4 rögzíthető görgő	Lagúna zöld 80229325
49 cm (19¼"), 4 rögzíthető kerék, puha háttámla, edénytartó	80229287	55 cm (21¼"), 4 rögzíthető görgő	80229321
55 cm (21¼"), 4 rögzíthető görgő, puha háttámla, edénytartó	80229288	49 cm (19¼"), 4 rögzíthető görgő, 2 db/doboz	80229319
		55 cm (21¼"), 4 rögzíthető görgő, 2 db/doboz	80229320
Tisztító és kényelmi készlet		Clean 24" elől nyíló üléssel	
49 cm (19¼"), 4 rögzíthető görgő, kényelmes ülés és huzat	Fehér 80229298	55 cm (21¼"), hátsó kerekekkel	Lagúna zöld 80229327
55 cm (21¼"), 4 rögzíthető görgő, kényelmes ülés és huzat	80229299		

További testreszabási lehetőségeket nyújtó kiegészítők

A termékek testreszabhatósága elengedhetetlen a képességek fejlesztéséhez és a mindennapi tevékenységekben való részvételhez. A Clean kiegészítői széles választékot kínálnak az egyéni igényekhez való igazításhoz, legyen szó kényelemről, támasztásról vagy további funkcionalitásról.



Kényelem

Egy kis extra puhaság növelheti a felhasználó kényelmét és segíthet a melegen tartásban. Számos puha ülés, valamint háttámla- és kartámasz-párna áll rendelkezésre.

Támasztás és testtartás

A megfelelő ülőpozíció támogatása elengedhetetlen a felhasználók képességeinek elősegítéséhez, és javíthatja biztonságérzetüket. Különböző övek, keresztrúd vagy oldaltámaszok állnak rendelkezésre.

További funkciók

Bizonyos kiegészítővel bővíthető a funkcionalitás. Például különféle tálak és tálatartók, valamint a székre rögzíthető szappantartó is rendelkezésre áll.

Kiegészítők



Puha háttámla

80209225
Állítható háttámla puha hálós anyagból. Nagyobb kényelmet biztosít azoknak a felhasználóknak, akiknek puhább támaszra van szükségük, mivel a gerinc ívéhez igazodik. A hátsó 3 csat segítségével könnyen állítható.



Ülőshuzat

80209528
Puha ülőshuzat azok számára, akik teljes ülőfelületet preferálnak. 2 cm magas.



Oldaltámasz

80209509
Párnázott oldaltámasz a jobb testtartás és a kényelmes ülésérzet érdekében. Szélességében állítható. Kompatibilis a szokásos háttámlával.



Ülőshuzat

80209247
Ülőshuzat, ha teljes ülésre van szükség.



Puha háttámla párna

80209261
Háttámla párna az extra melegség és puhaság érdekében. Hővisszaverő anyag csúszásgátló felülettel. A szokásos háttámlával együtt használható.



Puha párna

80209260
Vékony, puha ülés hővisszaverő tulajdonságokkal és csúszásgátló felülettel. Nyílás szélessége: 17 cm (6 $\frac{3}{4}$ ”).

Kiegészítők



Puha kényelmi ülés, 2 cm magas

80209517

Puha ülés az extra kényelemért. Finoman ívelt nyílás, elülső mélyedéssel a könnyű beülés érdekében.

Nyílás szélessége 18 cm (7").



Puha kényelmi ülés, 4 cm magas

Nyílás szélessége 15 cm (6"): 80209301

Nyílásszélesség 18 cm (7"): 80209227

Puha ülés a kényelem érdekében.

Finoman

kialakított nyílás, elülső mélyedéssel a könnyű beülés érdekében.



Puha, kényelmes ülés, elöl nyitott

80209527

Kényelmes ülés az ülés extra puhaságáért.

Kompatibilis a Clean elülső nyílású üléssel. 2 cm magas.



Kényelmes kartámaszok

80209226

Puha támaszt nyújt az alkaroknak, miközben a kartámasz markolófelülete szabadon marad, hogy felálláskor biztos fogást biztosítson.



Kényelmi huzat

80209228

Puha háttámla beépített kartámasz párnákkal a nagyobb kényelem és támasz érdekében. Vízlepergető és hővisszaverő felület.



Kényelmi készlet

80209237

Kényelmi készlet, amely fokozza a jó közérzetet és körülveszi a felhasználót. Tartalmazza a Comfort fedelet és a 4 cm vastag puha kényelmi ülőfelületet.



Csípő-/mellkasöv kárpitozott

80209524

Puha és gyorsan száradó öv a biztos tartás és pozicionálás érdekében. Hossza 65–130 cm, 3 csat segítségével állítható. Minden Clean modellnél csípőövetként, a puha háttámlával pedig mellkasövetként is használható.



Csípőöv

80209440

Támogatást nyújt a medencének. Műanyag csat segítségével könnyen beállítható a kívánt hosszúságra. Tépőzáras pántokkal rögzíthető a hátsó csövek köré.



Mellkasöv

80209442

Első támaszt nyújt a törzsnek. Hossza könnyen állítható, és a háttámla pántjai köré rögzíthető. Ajánlott csípőövvvel együtt használni. Csak a puha háttámlával kompatibilis.



Biztonsági heveder

80209034

A háttámla hátsó oldalához rögzíthető. Mindig pozicionáló övvel együtt kell használni. Csak a hagyományos háttámlával kompatibilis.



Keresztrúd

80209246

Használható kapaszkodásra, előrehajlásra, valamint a felhasználó biztonságérzetének növelésére. Könnyen rögzíthető a kartámaszokhoz.



Szappantartó

80209266

Szappantartó beépített tartóval a zuhanyfogantyúhoz. Edényfedél vagy WC-papír tárolására is használható. Könnyen rögzíthető az ülés oldalára.



Fröccsenésgátló

80209430

Puha védelmet nyújt elöl a fröccsenő víz ellen. Az ülés elejére rögzíthető és könnyen eltávolítható. A jobb irányítás érdekében kézben is tartható.



Pan

Tál fedéllel és fogantyúval: 80209255

Csak serpenyő: 80209254. Csak fedél: 80209256

Úgy alakították ki, hogy megakadályozza a kiömlést és megkönnyítse az ürítést/öntést. Okos fedél, amely emeléskor automatikusan reteszeli. A serpenyőtartót külön kell megrendelni.

Kiegészítők



Tálca tartó

80209257

Vékony peremű edényekhez, ágytálakhoz és hagyományos kórházi edényekhez egyaránt alkalmas. A szék alatt található, alapfelszereltségként mellékelt rögzítőtartókba pattan be.



Rögzítőelem a tálca/vödör alacsony felszereléséhez

80209259

A vödör/edénytartóra szerelhető. 6 cm-rel (2½") lejjebb helyezi a vödör/edénytartót.



Vödör fogantyúval és fedéllel

80209265

Hagyományos vödör, amelyet vödörtartóval együtt használnak. Fedéllel együtt. A vödörtartó külön rendelhető.



Eldobható edények

80209282

Erős és szilárd eldobható edények. 50 db



Vödörtartó

80209258

Fogantyúval és fedéllel ellátott vödörhöz, valamint más, vastag peremű/magas szélű vödörhöz is használható. Az ülés alatt található, alapfelszereltségként mellékelt rögzítőtartókba pattan be.



Tálca tartó készlet

80209229

Eldobható edényekhez alkalmas edénytartó.

További kiegészítők

Csak a 49 vagy 55 cm-es Clean modellekhez



Hátsó kerék adapter

Szürke: 80209262

Fehér: 80209305

Adapter a standard hátsó kerekek 24 hüvelykes kerekre cseréléséhez.

Kompatibilis a Clean 55 cm-es modellel.



Magasságnövelő készlet kerekkel

Fehér: 80209511

Zöld: 80209512

Távtartók, amelyek 5 cm-rel emelik az ülés magasságát. Nem kompatibilis a Clean 24" modellel. 4 darabos csomagban kapható.



75 mm-es (3") görgők

Fehér: Első – 80209515. Hátsó – 80209516

Zöld: Első – 80209513. Hátsó – 80209514

Ha extra alacsony ülés magasságra van szükség. 5 cm-rel (2") csökkenti az ülés magasságát. Alapfelszereltségként a Clean 44 cm-es modellre szerelhető. Kompatibilis a Clean 49 cm-es modellel. Párban kapható.

Csak a magasságállítható Clean modellekhez



Felhajtható lábtámaszok

80209250

Összecsukható, magasságállítható és eltávolítható lábtámaszok. Kompatibilis a Clean magasságállítható modellel. Párban kapható.

További információ

A teljes termékválaszték és az egyes kiegészítőkkal kapcsolatos további részletekért látogasson el a www.etac.com weboldalra.



Az Etac a világ vezető fejlesztője az innovatív segédeszközök és betegmozgató berendezések terén. 1973 óta elkötelezettek vagyunk az az egyén, a családtagok és a gondozók életminőségének javítására.

A termékek rendeltetésszerű használatáról és a legfrissebb információkról a www.etac.com oldalon tájékozódhat.

Etac

+46 371 587 330



info@etac.se



www.etac.com



etac[®]

Creating Possibilities